

microFET 2™



Positions pour le test musculaire quantifié

Les figures illustrent la mise en place du MicroFET pour le contrôle des muscles, les positions et les immobilisations correspondantes.



ILIO-PSOAS (L2,3) FLEXION DE LA HANCHE.
Placer le MicroFET sur la face antérieure de la cuisse, près du genou.



GRAND GLUTÉAL (L5, S1, 2)
EXTENSION DE LA HANCHE. Placer le MicroFET sur la face postérieure de la cuisse, près du genou.



MOYEN GLUTÉAL (L4, 5, S1)
ABDUCTION DE LA HANCHE. Placer le MicroFET sur la face latérale de la jambe, près du genou.



TENSEUR DU FASCIA LATA (L4, 5, S1)
ABDUCTION DE LA HANCHE. Placer le MicroFET sur la face latérale de la jambe, près du genou.



PECTINÉ ET DROIT INTERNE (L2, 3, 4)
ADDUCTION DE LA HANCHE. Placer le MicroFET sur la face interne de la cuisse, près du genou.



OBTURATEUR & CARRÉ CRURAL (L3, 4, 5, S1, 2)
ROTATION EXT. DE HANCHE. Placer le MicroFET sur la face interne de la jambe, près de la cheville.



PETIT FESSIER & TENSEUR DU FASCIA LATA (L4, 5, S1)
ROT. INT. DE HANCHE. Placer le MicroFET sur la face latérale de la jambe, près de la cheville.



SEMI-TENDINEUX ET SEMI-MEMBRANEUX (L5, S1, 2)
FLEXION DU GENOU. Placer le MicroFET sur la face postéro-médiale de la jambe près de la cheville, la jambe en rotation interne.



BICEPS FÉMORAL (L5, S1, 2, 3)
FLEXION DU GENOU. Placer le MicroFET sur la face postéro-latérale de la jambe près de la cheville, la jambe en rotation latérale.



QUADRICEPS (L2, 3, 4)
EXTENSION DU GENOU. Placer le MicroFET sur la face antérieure de la jambe, près de la cheville.



TIBIAL ANTÉRIEUR (L4, 5, S1)
DORSIFLEX. DE CHEVILLE & INVERSION DU PIED. Placer le MicroFET sur la face dorsale du pied, en regard du 1^{er} rayon.



EXTENSEUR DU GROS ORTEIL (L4, 5, S1)
EXTENSION DU GROS ORTEIL. Placer le MicroFET sur la face dorsale de la première phalange du gros orteil.


Pour assurer la précision de la mesure, arrêter le test avant que le mouvement n'amène le membre au contact de la table.

microFET
est un produit

HOGGAN

Distribué par

BIOMETRICS FRANCE

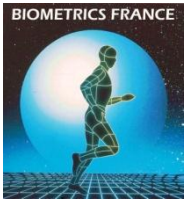

BIOMETRICS FRANCE

Parc Orsay Université
28 rue Jean Rostand
91893 ORSAY Cedex France

Tél : 01 60 19 34 35
Fax : 01 60 19 35 27
www.biometrics.fr



MUSCLES DU COU (C4, 5, 6)
INCLINAISON DE LA TÊTE. Placer le MicroFET sur la face latérale du crâne, au-dessus de l'oreille.



FAISCEAU MOYEN DU DELTOÏDE (C5, 6) ABDUCTION DE L'ÉPAULE. Placer le MicroFET sur la face supérieure de du bras, au dessus du coude.



FAISCEAU POSTÉRIEUR DU DELTOÏDE (C5, 6) ABDUCTION HORIZ. DE L'ÉPAULE. Placer le MicroFET sur la face postérieure du bras, près du coude.



FAISCEAU ANTÉRIEUR DU DELTOÏDE (C5, 6) FLEXION DE L'ÉPAULE. Placer le MicroFET sur la face antérieure du bras, près du coude.



SUBSCAPULAIRE (C5, 6) ROTATION MÉDIALE DE L'ÉPAULE. Placer le MicroFET sur la face interne de l'avant-bras, près du poignet.



INFRA-ÉPINEUX ET PETIT ROND (C5, 6) ROTATION EXTERNE DE L'ÉPAULE. Placer le MicroFET sur la face externe de l'avant-bras, près du poignet.



GRAND PECTORAL (C5, 6, 7, 8, T1) ADDUCTION HORIZONTALE DE L'ÉPAULE. Placer le MicroFET sur la face interne du bras, près du coude.



TRAPÈZE MÉDIAN (C3, 4) ADDUCTION SCAPULAIRE. Placer le MicroFET à l'angle latéral de l'omoplate, près de l'articulation de l'épaule.



TRICEPS BRACHIAL (C7, 8) EXTENSION DU COUDE. Placer le MicroFET sur la face postérieure de l'avant-bras, près du poignet.



ADDUCTEUR DU POUCE (C8, T1) ADDUCTION DU POUCE. Placer le MicroFET sur la face interne du pouce, près de la paume.



BRACHIO-RADIAL (C5, 6) FLEXION DU COUDE. Placer le MicroFET sur la face radiale de l'avant-bras, près du poignet.



BICEPS & BRACHIAL (C5, 6) FLEXION DU COUDE. Placer le MicroFET sur la face antérieure de l'avant-bras, près du poignet.



EXTENSEURS LONG & COURT (C6, 7) EXTENSION DU POIGNET. Placer le MicroFET sur la face dorsale de la main, à distance du poignet.